

フックロックバンテージ

NISHI


取扱説明書

品番：KC2021、KC2022

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

 **注意すること**

- 本品は、綿とポリエステルでできています。
皮膚過敏症のある方は使用しないでください。

 **してはいけないこと**

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 過度に強く引っ張って巻かないでください。
- 血行障害、打撲有痛性青股腫、化膿性静脈炎の方は、症状悪化の原因になりますので、使用しないでください。
- 本品をハサミなどで切断すると切断部からほつれます。
切断して使用しないでください。

 **必ず行うこと**

- 次の方は、使用前に専門医に相談してください。
高血圧・心臓・肺・血管の疾患で治療を受けている方、
糖尿病で治療を受けている方、使用部位に炎症や化膿・
疼痛を伴う皮膚疾患・創傷のある方、使用部位に神経
障害や知覚障害がある方、急性期の静脈血栓症の方、
極端に腕や脚が細い方
- 他の包帯類や弾性ストッキングなど本品以外のものと
組み合わせて使用する場合は、必ず専門医に相談し、
その指導内容に従いご使用ください。
- 本品は、時間とともに少しずつ緩むことがあります。
定期的を確認し、巻き直しを行ってください。
ずり落ちたり緩んだりした状態では、十分な圧迫固定
ができない可能性があります。また、部分的に過剰な
圧迫がかかる恐れがあります。
- 使用中または使用後に、痛みやしびれ、発赤や発疹、
かゆみなどの症状が現れた場合は、ただちに使用を中
止し専門医にご相談ください。
- 水濡れに注意し、直射日光及び高温・多湿を避けて保
管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってくだ
さい。

はじめに

本品は、両端に面ファスナーが付いた伸縮性包帯です。
巻き始めは患部に合わせやすく、巻き終わりはテープや
包帯止めを使用しなくても固定できます。アイスバッグ
の固定などにもお使いいただけます。


仕様

- KC2021 サイズ：(W) 102mm × (L) 約1.6m
- KC2022 サイズ：(W) 152mm × (L) 約1.6m

共通仕様

- 最大伸張：約4.5m
- 材質：綿、ポリエステル混合
- 両端面ファスナー付き
- 中国製
- ※ラテックスフリー
- ※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更すること

洗濯について

- 中性洗剤を使用し、水またはぬるま湯での手洗いをおす
めします。
やむを得ず洗濯機を使用する場合は、洗濯ネットに入れ
て洗濯してください。
- 熱湯や塩素系漂白剤、消毒剤、アイロン、乾燥機の使用
及びドライクリーニングは、品質低下の原因になります
ので避けてください。
- 洗濯後は、直射日光を避け風通しのよい日陰で乾燥させ
てください。
- 本品を引き伸ばした状態で乾燥させると、伸縮性が低下
しますのでご注意ください。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご
不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様
相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象にな
り、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>